	Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública	Código : P/IS/018 Revisión : 3 Fecha : 14/5/2010 Página : 3 de 3
	<b>Procedimiento para la ejecución de de pruebas ELISA para <i>toxoplasma gondii</i></b>	

## 1.0 OBJETIVO

Definir las pautas para la ejecución de análisis de muestras que requieran pruebas de ELISA para *toxoplasma gondii*, en la sección de Inmunoserología del LCRSP

## 2.0 ALCANCE

Este proceso se aplica a todas las muestras que requieran estudios de anticuerpos tipo IgG para *toxoplasma gondii*, en el área de inmunoserología del LCRSP.

## 3.0 RESPONSABILIDADES

### 3.1 Tecnólogo Médico

- 3.1.1 Ubicar las muestras que se vayan a analizar.
- 3.1.2 Ubicar los reactivos en las neveras destinadas para tal fin.
- 3.1.3 Preparar las hojas de trabajo.
- 3.1.4 Ejecutar el análisis de las muestras según la metodología adecuada.
- 3.1.5 Realizar la interpretación de los resultados.
- 3.1.7 Reportar los resultados en las papeletas y libros de trabajo correspondientes.
- 3.1.8 Entregar los resultados a la secretaria del LCRSP
- 3.1.9 Anotar el número de pruebas realizadas en las fichas individuales de reactivos.
- 3.1.10 Anotar el resultado de los controles internos y del kit de reactivos en el registro de controles por prueba.

### 3.2 Secretaria del LCRSP Ver: P/IS/003



### 3.3 Jefe de la sección Ver: P/IS/003

## 4.0 REFERENCIAS

- 4.1 Inserto de cada kit de reactivo
- 4.2 Ficha técnica de cada equipo
- 4.3 Manual de Bioseguridad

## 5.0 EQUIPOS Y MATERIALES

- 5.1 Micropipetas
- 5.2 Puntas para micropipetas
- Equipo automatizado para ELISA
- 5.3 Reactivos provistos en cada kit de pruebas de toxo
- 5.4 Libro de trabajo
- 5.5 Papeletas de Reporte

 	Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública	Código : P/IS/018 Revisión : 3 Fecha : 14/5/2010 Página : 3 de 3
	<b>Procedimiento para la ejecución de de pruebas ELISA para <i>toxoplasma gondii</i></b>	

## 6.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 6.1 Proceso Pre-Analítico

- 6.1.1 Leer la metodología de la prueba a realizar
- 6.1.2 Seleccionar las muestras y controles que se van a procesar.
- 6.1.3 Preparar una hoja de trabajo con nombres y número de muestras a procesar (Mapa de Trabajo).

### 6.2 Proceso Analítico

- 6.2.1 Llevar todos los reactivos a temperatura de cuarto.
- 6.2.2 Dar vortex a las muestras.
- 6.2.3 Para la ejecución de las pruebas de toxo revisar los insertos de los kit de reactivos y la ficha técnica de cada equipo.

### 6.3 Proceso post-Analítico

- 6.3.1 Interpretación de Resultados
- 6.3.2 Reporte de Resultados.

## 7.0 ANEXOS

- 7.1 ANEXO A: Hoja de Trabajo

